



## Kurz-Anleitung SPARKvue

Öffne die App SPARKvue. Wähle hier z.B. „Messwerte“.

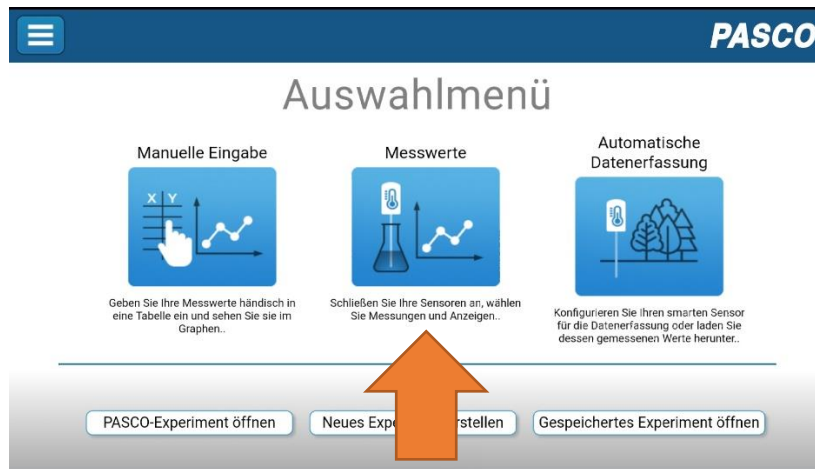

Aktiviere den passenden Sensor (z.B. den Beschleunigungssensor).  
Klicke anschließend z.B. auf „Tabelle und Graph“.

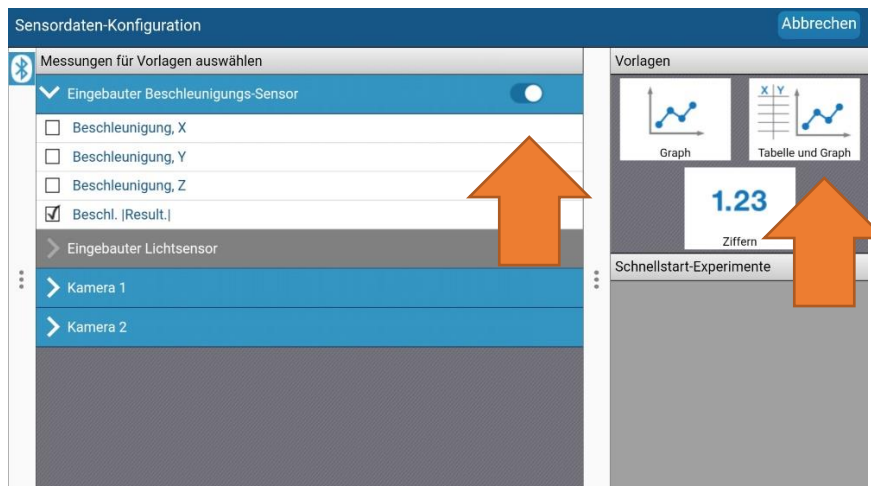


## Kurz-Anleitung SPARKvue

Dieses Material wurde erstellt von Arne Sorgenfrei und Ole Koch und steht unter der Lizenz [CC BY NC-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



## Kurz-Anleitung SPARKvue

Der Vollbildmodus kann über den 4. Button oben rechts hergestellt werden.  
Um die Messung zu starten, klicke auf „Start“.

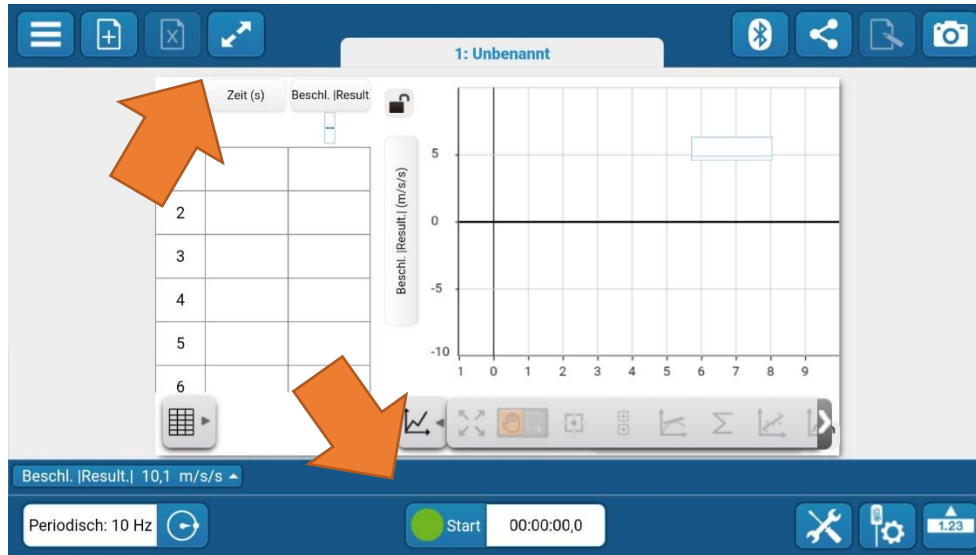

Über die Buttons unten lassen sich nach der Messung z.B. einzelne Datenpunkte auslesen.



## Kurz-Anleitung SPARKvue

Dieses Material wurde erstellt von Arne Sorgenfrei und Ole Koch und steht unter der Lizenz [CC BY NC-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

